


Importer/dystrybutor

PPHU ZARTEX  
Tadeusz Zaręba  
Wólka Abramowicka 71  
20-388 Lublin  
tel 81 751 87 04  
zartex@wp.pl

## INSTRUKCJA OBSŁUGI REDUKTORA DO TLENU

### 1. Montaż reduktora na butli z gazem:

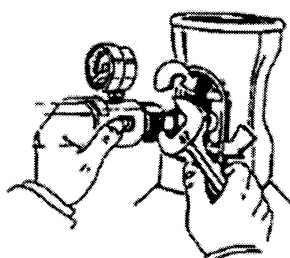

Dokręcanie za pomocą klucza  
z zastosowaniem uszczeltek płaskich

**Pod żadnym pozorem nie smarować elementów przyłączeniowych reduktora i butli. Smar lub olej mogą doprowadzić do samozapłonu reduktora i butli!**

**Pod żadnym pozorem nie stosować środków odkażających na bazie alkoholu lub innych środków łatwopalnych. Za wszelką cenę unikać kontaktu reduktora lub butli tlenowej z alkoholem,**

2. Po upewnieniu się, że reduktor jest dokręcony prawidłowo. Powoli i stopniowo otworzyć butlę z gazem poprzez przekręcenie pokrętła na zaworze butli.
3. Ciśnienie, które wskazuje manometr reduktora jest ciśnieniem gazu w butli.
4. Ciśnienie wylotowe jest widoczne na rotametrze i oznaczone w litrach na minutę.
5. Przed użyciem należy wypełnić wodą destylowaną pojemnik pod rotametrem. Woda ta pełni rolę nawilzacza tlenu.
6. Aby spowodować wylot gazu z reduktora należy delikatnie odkręcić pokrętło przy rotametrze, odkręcać do potrzebnego poziomu wskaźnika rotametry.
7. Wymagana pozycja pracy reduktora to pozycja stojąca tak jak i butli, nie używać w pozycji leżącej.
8. Po zakończonej pracy butlę należy powoli i stopniowo zakręcić poprzez przekręcenie pokrętła zaworu na butli z gazem.

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Nazwa i adres importera: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe  
„ZARTEX”, Tadeusz Zaręba, Wólka Abramowicka 71, 20-388  
Lublin

Nazwa i adres fabryki: j/w

Nazwa wyrobu: Reduktor do Tlenu z rotametrem i nawilżaczem

Wyrób jest zgodny  
z dyrektywami  
Unii Europejskiej i


**EN13485:2003**  
**ISO 13485:2003**  
**Dyrektywą UE 93/42/EEC Aneks II z wyłączeniem  
sekcji 4**

spełnia Wymagania  
zawarte w normach  
zharmonizowanych:

*Wyprodukowane na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, oznakowane i dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej przez jednostkę notyfikującą SGS Belgium NV numer 1639, numer certyfikatu CN19/41082.*

Miejscowość i data: Lublin 22.01.2021

Wystawił:

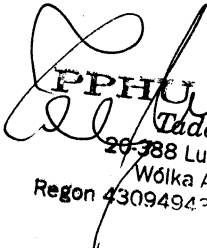  
**PPHU ZARTEX**  
Tadeusz Zaręba  
20-388 Lublin, tel. 751-87-04  
Wólka Abramowicka 71  
Regon 430949435 NIP 710-102-10-7